



Mp3

Compra hoy y recíbelo mañana

Hueso cortical y esponjoso con 10% de colágeno

Fotografía cortesía de la Dra. Laura Casillas Ruiz

Indicaciones clínicas

Específicamente recomendadas



**ELEVACIÓN DE
SENO MAXILAR**



**REG. VERTICAL
TÉCNICA INLAY
(CON SP-BLOCK)**



**ALVÉOLOS
POST-EXTRACCIÓN**



**DEFECTOS A
DOS PAREDES**

Mp3



Sustituto óseo en jeringa 600-1000 micras

Máximo rendimiento y manejo

Mp3® está compuesto de gránulos prehidratados colagenados córtico-esponjosos pertinentemente mezclados con OsteoBiol® Gel 0. Gracias a esta característica, es posible **omitir la fase de hidratación y así reducir el riesgo de una exposición accidental** del material a agentes patógenos durante la fase de preparación.

Gradualmente reabsorbible, preserva la forma y el volumen del injerto original (propiedad osteoconductiva).

MODO DE EMPLEO:

Mp3® está disponible en jeringas listas para su utilización y puede ser injertado fácilmente omitiendo las fases de hidratación y manipulación. Después de adaptar el material a la forma del defecto, es necesario eliminar los residuos no estables antes de proceder a la sutura de los tejidos blandos.



Fotografía cortesía del Dr. Hani Elsaheb Murad

Composición 90% mix granulado, 10% gel de colágeno.

Tiempo de reentrada Aprox. 5 meses, dependiendo de la zona en la que se produzca la regeneración y el volumen.

Origen Porcino Equino	Nombre	Envase	Precio
A3075FS	Mp3	Jeringa 0,25 c.c x 3 uds.	235 €
A3005FS A3005FE	Mp3	Jeringa 1,00 c.c	135 €
A3015FS A3015FE	Mp3	Jeringa 0,50 c.c x 3 uds.	281 €
A3010FS	Mp3	Jeringa 2,0 c.c	224 €
A3210FS	Mp3 1000 - 2000 micras	Jeringa 2,0 c.c	224 €