



Putty


Compra hoy y recíbelo mañana

Pasta de mix de hueso con un 20% de colágeno

Fotografía cortesía del Dr. Emilio Rodríguez

Indicaciones clínicas

Específicamente recomendadas

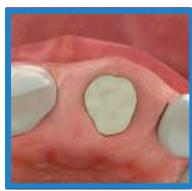

ALVÉOLOS POST-EXTRACCIÓN



DEFECTOS PERIIMPLANTARIOS SI LAS PAREDES SON PRESERVADAS



AUMENTO DEL SENO MAXILAR. ACCESO CRESTAL



SPLIT CREST

Putty



Sustituto óseo en jeringa ≤ 300 micras

Diseñado para defectos periimplantarios

Se produce mediante un proceso exclusivo que otorga al producto una plasticidad y maleabilidad excepcional, facilitando su aplicación en alveolos y en defectos con paredes.

El éxito del injerto **necesita una completa estabilidad del biomaterial:** por éste motivo, Putty tiene que ser utilizado solo en una cavidad capaz de contenerlo de modo estable. En ningún caso tiene que ser injertado en defectos a dos paredes o en procedimientos de elevación de seno con acceso lateral.



Fotografía cortesía del Dr. Mario Alvarado Lorenzo

MODO DE EMPLEO:

Aplicar el producto y adaptarlo a la morfología del defecto sin comprimirlo; todos los residuos no estables deben retirarse antes de suturar los tejidos blandos.

Composición 80% mix granulado, 20% gel de colágeno.

Tiempo de reentrada Aprox. 4 meses.

Origen Porcino Equino	Nombre	Envase	Precio
HPT52S	Putty	Jeringa 0,25 c.c	74 €
HPT32S HPT32E	Putty	Jeringa 0,25 c.c x 3 uds. PACK AHORRO	210 €
HPT09S HPT09E	Putty	Jeringa 0,50 c.c	107 €
HPT35S HPT35E	Putty	Jeringa 0,50 c.c x 3 uds. PACK AHORRO	288 €
HPT61S	Putty	Jeringa 1,0 c.c	197 €