

# Gen-Os



## Sustituto óseo en grano 250-1000 micras

### Ventajas de los "Dual-phase"

Gen-Os® se reabsorbe gradualmente y asegura una acción de soporte para la formación ósea, contribuyendo a **preservar la forma y el volumen del injerto original (propiedad osteoconductiva)**.

Además, gracias a su contenido de colágeno, el producto facilita la formación del coágulo hemático y la consiguiente invasión de las células reparadoras y regeneradoras, favoreciendo la completa "restitución e integración" del déficit óseo.

### MODO DE EMPLEO

Debe estar siempre hidratado y bien mezclado con unas gotas de solución fisiológica estéril para activar su matriz de colágeno y aumentar su adhesividad; también puede ser mezclado con la sangre del paciente.



Fotografía cortesía del Dr. David Sevilla López.

**Composición** 100% granulado mix **Tiempo de reentrada** Aprox. 5 meses

M1052FS Gen-Os Envase 0,25 gr. (Aprox. 0,4 c.c.)

M1005FS Gen-Os Envase 0,50 gr. (Aprox. 0,8 c.c.)

M1010FS Gen-Os Envase 1,0 gr. (Aprox. 1,6 c.c.)

TSVG05 Kit Gen-Os + TSV Gel Gen-Os 0,5 gr + TSV Gel 0,5 cc

TSVG10 Kit Gen-Os + TSV Gel Gen-Os 1,0 gr + TSV Gel 1,0 cc